


**DOCUMENT TECHNIQUE- TECHNICAL DOCUMENT**


**MASK 5-SB :**

- *Masque respiratoire textile réutilisable\* pour la protection contre les agents pathogènes en suspension dans l'air. Réalisé conformément à la circulaire européenne 245/2016. \*(après désinfection par lavage à 60 ° ou par pulvérisation de solution alcoolique à pas moins de 60 volumes)*
- *Reusable\* textile respiratory mask for protection against airborne pathogens. Carried out in compliance with the European circular 245/2016. \*(after sanitization by washing at 60 ° or by spraying alcoholic solution at no less than 60 volumes)*

Fabricant / Manufacturer: **FORUM GROUPE sarl** - Beni Hassen - Tunisie. Info@forumgroupe.com.tn

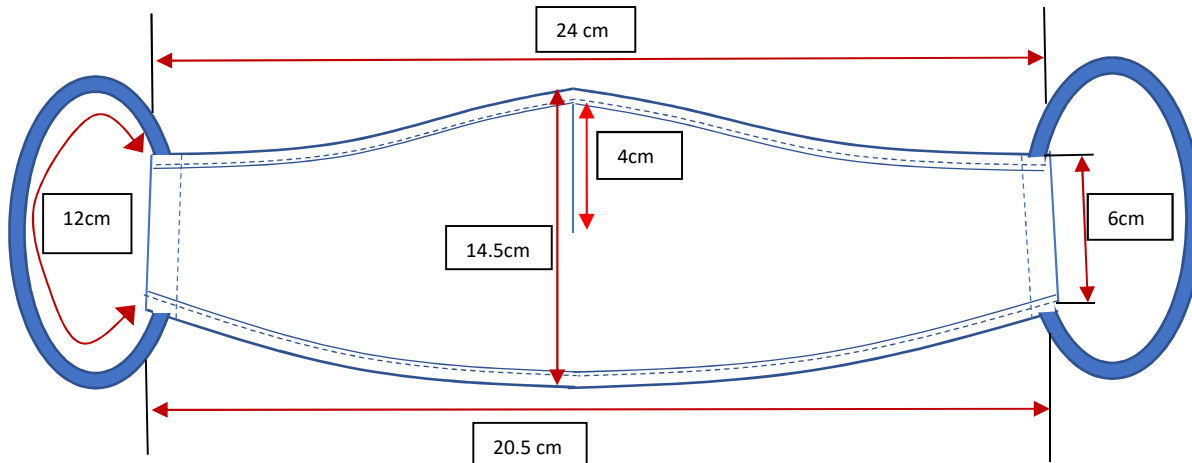

Model - Pattern

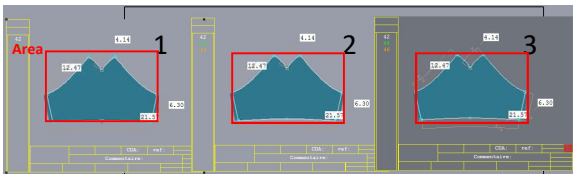

Composants et matériaux d'assemblage- Component and assembling materials

- 1- Tissu extérieur/ Outer fabric** - 100% polyester 110 gr / m2 Imperméable- Waterproof. Colour Blanche/ White.  
Fabricant / Manufacturer Sté STIT Ksar Hallal Tunisie. **CONSUMPTION 4,5 DÉCIMÈTRES CARRÉS**  
Retrait longitudinal / orthogonal > 3%
- 2- Tissu median/ Median fabric** - 80% polyester 20 % Elasthane 160 gr / m2. Colour Blanche/ White.  
Fabricant / Manufacturer Sté Oktex Barcellona Spain **CONSUMPTION 4,5 DÉCIMÈTRES CARRÉS**  
Retrait/Shrinkage longitudinal- orthogonal > 3%
- 3- Tissu en contact avec la peau**  
**Fabric in contact with the skin** - 100% coton 110 gr / m2 Colour Blanche/ White.  
Fabricant / Manufacturer Sté STIT Ksar Hallal Tunisie **CONSUMPTION 6,0 DÉCIMÈTRES CARRÉS**  
Retrait/ Shrinkage longitudinal > 3,9%  
Retrait/ Shrinkage orthogonal > 4,5%



**DOCUMENT TECHNIQUE- TECHNICAL DOCUMENT****MASK 5-SB :**

- *Masque respiratoire textile réutilisable\* pour la protection contre les agents pathogènes en suspension dans l'air. Réalisé conformément à la circulaire européenne 245/2016. \*(après désinfection par lavage à 60 ° ou par pulvérisation de solution alcoolique à pas moins de 60 volumes)*
- *Reusable\* textile respiratory mask for protection against airborne pathogens. Carried out in compliance with the European circular 245/2016. \*(after sanitization by washing at 60 ° or by spraying alcoholic solution at no less than 60 volumes)*

Fabricant / Manufacturer: **FORUM GROUPE sarl** - Beni Hassen - Tunisie. Info@forumgroupe.com.tn

**4- Ruban élastique-Elastic tape****Caoutchouc recouvert de polyester - Rubber covered with polyester****5- Fil à coudre- Sewing thread****100% polyester titre / gage 110 color blanche/ white****Manufacturing method and machinery - Méthode et machines de fabrication**

- Étalement du tissu avec chariot automatique / laying of the fabric with automatic trolley
- Coupe du tissu selon la disposition avec système de coupe automatique avec lame vibrante/ fabric cutting according to layout with automatic cutting system with vibrating blade
- Couture avec des machines à coudre selon le schéma ci-dessous/ sewing with sewing machines according to the scheme below

MASK 5	Opération	Machine	CODE INTERNATIONAL DE COUTURE	FREQUENCE/-PARAMETRAGE
1	<b>Piquer pince milieu bavette - Stitch middle bib clamp</b>	PIQUEUSE SIMPLE	301	> 6 stitches / cm
2	<b>Glaçer haut+ bas masque Glaze top + bottom mask</b>	PIQUEUSE SIMPLE	301	>4 stitches / cm
4	<b>Poser biais haut et bas Place bias up and down</b>	PIQUEUSE SIMPLE	301	>5 stitches /CM
5	<b>Surfiler deux cotés (ourlet) Overcast two sides (hem)</b>	SURJET 3FILS	516 ( 327 )	>5 stitches /CM
6	<b>Poser élastique cotés Lay elastic sides</b>	PIQUEUSE SIMPLE	301	>5 stitches /CM
7	<b>Ourlet cotés Hemmed sides</b>	PIQUEUSE SIMPLE	301	>5 stitches /CM
8	<b>Nettoyage des fils Treads cleaning</b>	MAIN		
9	<b>Repassage Ironing</b>	FER A' MAIN	180°- sans vapeur	
10	<b>Controler finale Final check</b>	MAIN		
11	<b>EMBALLAGE PACKAGING</b>	MAIN		

## DOCUMENT TECHNIQUE- TECHNICAL DOCUMENT

### MASK 5-SB :

- *Masque respiratoire textile réutilisable\* pour la protection contre les agents pathogènes en suspension dans l'air. Réalisé conformément à la circulaire européenne 245/2016. \*(après désinfection par lavage à 60 ° ou par pulvérisation de solution alcoolique à pas moins de 60 volumes)*
- *Reusable\* textile respiratory mask for protection against airborne pathogens. Carried out in compliance with the European circular 245/2016. \*(after sanitization by washing at 60 ° or by spraying alcoholic solution at no less than 60 volumes)*

Fabricant / Manufacturer: **FORUM GROUPE sarl** - Beni Hassen - Tunisie. Info@forumgroupe.com.tn

### Produit fini – Final product



### Instruction de port - Wear instruction



### Emballage et étiquetage - Packaging and labeling

. Conditionnement d'un seul masque dans un sac PVC (dimension 10\*20 cm) neutre fermé par du ruban adhésif.

Une étiquette adhésive est appliquée sur l'enveloppe qui indique:

Article - composition - instruction de lavage et d'entretien - instruction d'utilisation sûre - instruction de désinfection.

. Packaging of a single mask in a neutral PVC bag (dimension 10\*20 cm) closed with adhesive tape.

An adhesive label is applied over the envelope which states:

Article - composition - washing and maintenance instruction - safe use instruction - sanitizing instruction.

**DOCUMENT TECHNIQUE- TECHNICAL DOCUMENT**

**MASK 5-SB :**

- *Masque respiratoire textile réutilisable\* pour la protection contre les agents pathogènes en suspension dans l'air. Réalisé conformément à la circulaire européenne 245/2016. \*(après désinfection par lavage à 60 ° ou par pulvérisation de solution alcoolique à pas moins de 60 volumes)*
- *Reusable\* textile respiratory mask for protection against airborne pathogens. Carried out in compliance with the European circular 245/2016. \*(after sanitization by washing at 60 ° or by spraying alcoholic solution at no less than 60 volumes)*

Fabricant / Manufacturer: **FORUM GROUPE sarl** - Beni Hassen - Tunisie. Info@forumgroupe.com.tn

